




Legen Sie bitte die Zahnprothese in ein Glas mit handwarmem Wasser. Sie muss komplett mit Wasser abgedeckt sein.

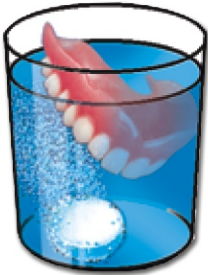

Geben Sie eine Express-Reinigungstablette ins Glas.



Nach nur 3 Minuten ist Ihre Zahnprothese gereinigt. Sie ist jetzt frisch und sauber.



Nach der Reinigung die Zahnprothese unter kaltem oder lauwarmem Wasser gründlich abspülen. Gegebenenfalls mit einer Zahnbürste nachpflegen.

Dentalexperten empfehlen aus Gründen der Hygiene und Sauberkeit eine tägliche Gebissreinigung mit Reinigungstabletten.

**Achtung:**

Das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Tablette nicht in den Mund nehmen. Augenkontakt vermeiden. Nur zur äußeren Anwendung.

**Inhaltsstoffe:**

Sodium Bicarbonate, Potassium Hydrogen Monopersulfate, Citric Acid, Lactose, Sodium Carbonate, PVP/VA Copolymer, Sodium Lauryl Sulfate, Peppermint Flavour, CI 73015