

1. Prothese gründlich reinigen. Rückstände auf der Mundschleimhaut entfernen.
2. Prothese feucht belassen, nicht trocknen (wichtig)!
3. Haftcreme sparsam auf die feuchte Prothese auftragen.

Nur 4 erbsengroße
Punkte auftragen
(ca. 1 g Haftcreme).



4. Sammeln Sie Speichel im Mund und befeuchten Sie damit Gaumen oder Unterkiefer. Je mehr Speichel um so mehr Haftkraft und Haftdauer.
5. Setzen Sie jetzt wie gewohnt Ihre Zahnprothese ein. Drücken Sie diese bitte einige Sekunden fest an. Warten Sie danach etwa 5 Minuten, bevor Sie essen und trinken.

Bitte beachten Sie:

Saubere Tubenöffnung

Damit die Tubenöffnung nicht verstopft, sollten Sie sofort nach jedem Gebrauch die Öffnung der Tube sauber abwischen und sofort zudrehen.

Temperatur

Sollte sich die Haftcreme nur schwer aus der Tube drücken lassen, ist sie wahrscheinlich zu kalt gelagert. In diesem Fall sollten Sie die geschlossene Tube kurz in einem warmen Wasserbad (35 - 50°C) erwärmen und zukünftig darauf achten, dass die Tube bei Zimmertemperatur gelagert wird.

Inhaltsstoffe:

Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Cellulose Gum, Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Menthol, Menthyl Lactate